

How To Use Advance Thumbnail


بررسی اجمالی:


همواره در هنگام بررسی تصاویر فعلی بیمار، نیاز به بررسی تصاویر قبلی بیمار در صورت وجود (و بدون خارج شدن از محیط مشاهده کنونی و برهم خوردن تمرکز کاربر) بعنوان ابزار مهمی در تشخیص براساس مقایسه با یافته‌های قبلی محسوب می‌گردد.

Infinitt Pacs با استفاده از ابزار Advance Thumbnail این امکان را به کاربران می‌دهد تا در هنگام مشاهده تصاویر فعلی بیمار، آزمونهای مرتبط و یا قبلی بیمار را همزمان و با هم در صفحه Viewing و براساس layout قابل تعریف مشاهده نموده و جهت تشخیص از آن استفاده نمایند. این ابزار سبب افزایش سرعت و سهولت در مشاهده Study های مربوط به یک بیمار می‌گردد.

روش کار:

۱- پس از انتخاب study مورد نظر و ورود به صفحه Viewing بر روی گزینه More کلیک نموده و اولین

سربرگ یعنی Common را انتخاب نمایید. سپس بر روی آیکون Advance Thumbnail  کلیک نمایید.

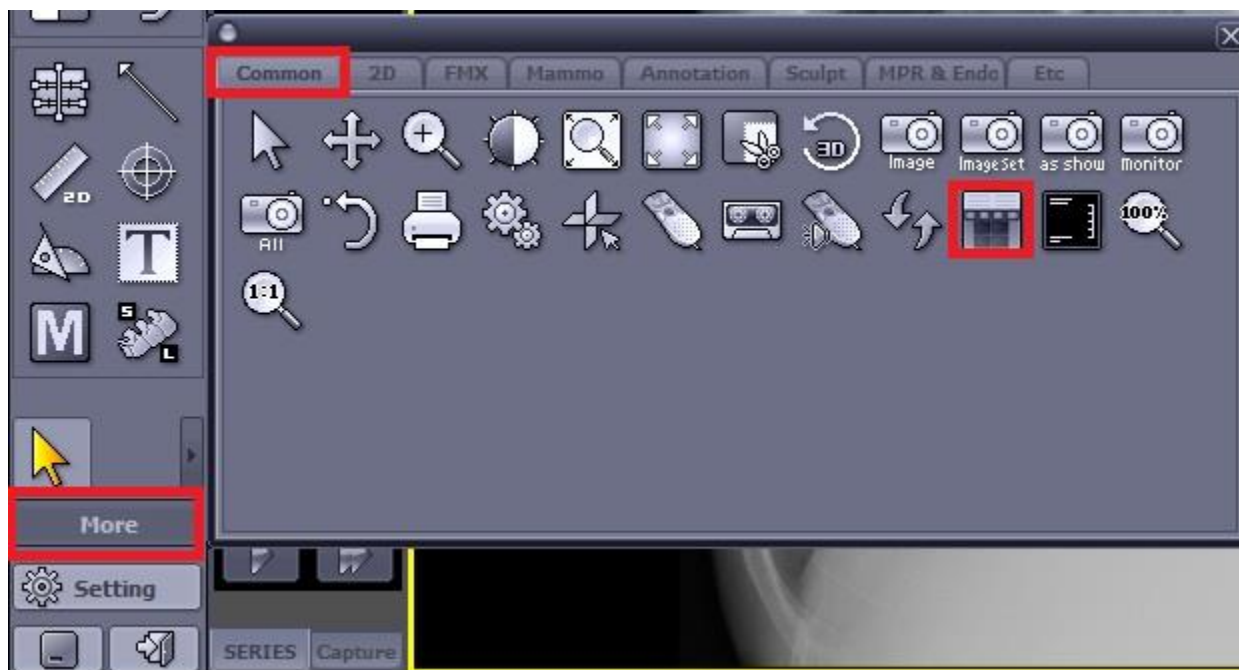

۲- در مرحله بعدی، پنجره‌ی Advance Thumbnail نمایان می‌گردد. در پنجره باز شده آزمونهای قبلی و مرتبط همان بیمار در صورت وجود و از دستگاههای تصویربرداری مختلف، نمایش داده می‌شود. در قسمت پایین این پنجره به شما امکان انتخاب Layout موردنظر جهت مشاهده study های مختلف بیمار داده شده است. (در اینجا به طور مثال 2x3 انتخاب شده است).

۳- در قسمت بالای پنجره Advance Thumbnail، امکان انتخاب نمایش تصاویر مرتبط بیمار از یک یا چند مودالیتی خاص و یا تمامی مودالیتی‌ها (All) فراهم شده است. در صورت وجود Study های قبلی مرتبط، با کلیک روی هر Study، پیش نمایش آن (شامل تمامی سریهای Study) در پایین صفحه ملاحظه می‌گردد و شما می‌توانید سری مدنظر از study انتخاب شده را در سلول دلفواه ماتریس انتخاب شده drag نمایید (و در نتیجه سایر سریهای study قابل دسترس خواهد بود) و در نهایت (روی گزینه ok کلیک نمایید تا وارد صفحه viewing شامل study های قبلی و فعلی بیمار با layout انتخابی شوید).



۴- همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید Study های بیمار همه باهم و در یک صفحه نمایش داده شده است. بنابراین برای بررسی study های قبلی بیمار نیازی به باز کردن صفحه‌های مشاهده مختلف پشت سر هم نیست و می‌توانید جهت مقایسه و بررسی بیشتر همه study ها را در یک صفحه مشاهده نمایید.

