


## How to Use Assign Specialty

### بررسی اجمالی


INFINITT PACS با استفاده از این قابلیت، این امکان را به کاربران می‌دهد تا study های مورد نظر را با یک لیبل خاص (specialty tag) متمایز نموده و برهاتی با استفاده از این لیبل، study های لیبل فورده را در worklist جستجو نمایند. مثلا میتوان study های مربوط به یک دیپارتمان خاص، یا یک گروه خاص از کاربران ، یا حتی یک پزشک خاص (بعنوان کارتل ایشان) را لیبل زده و به این ترتیب کاربران تنها به جستجوی study های مرتبط با فودشان فوهند پرداخت و یا اینکه فقط این study ها بصورت فودکار در صفحه worklist کاربری ایشان دیده فوهند شد.

### روش کار


- بر روی Study موردنظر در صفحه Worklist کلیک راست نموده و گزینه Assign Specialty را انتخاب نمایید.

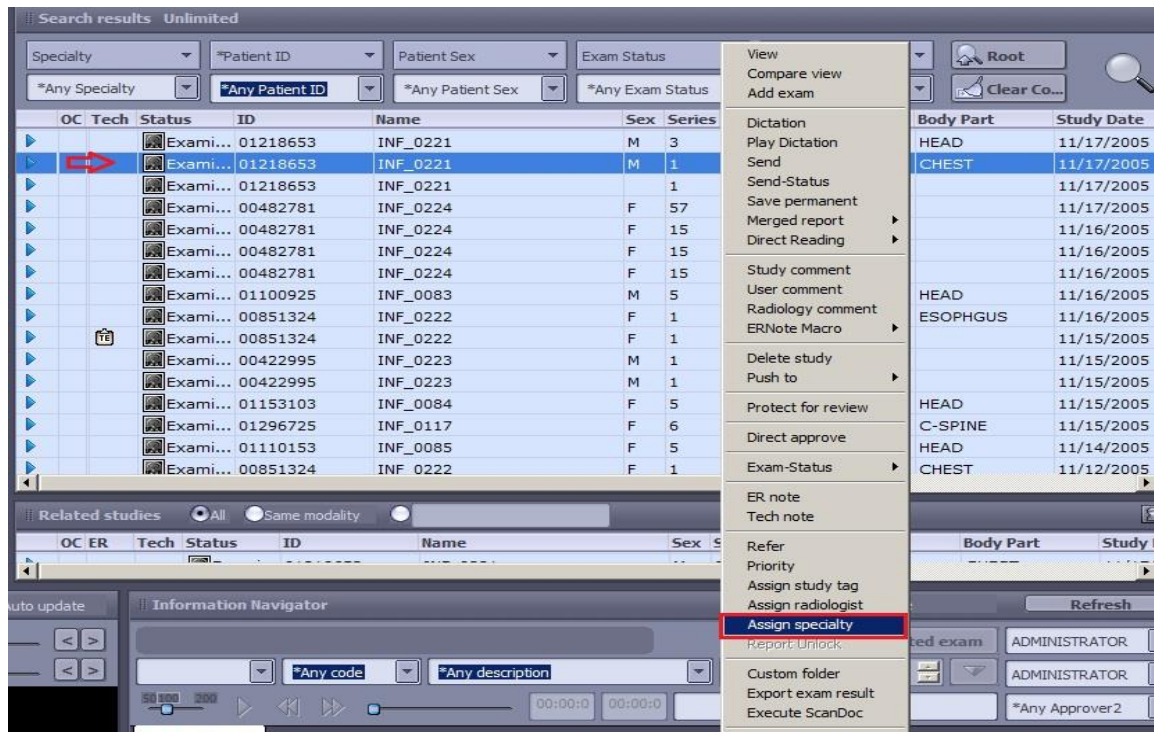

- سپس پنجره زیر باز می شود که لیبل (از قبل تعریف شده) مورد نظر خود را انتخاب نموده و بر روی Assign کلیک نمایید.

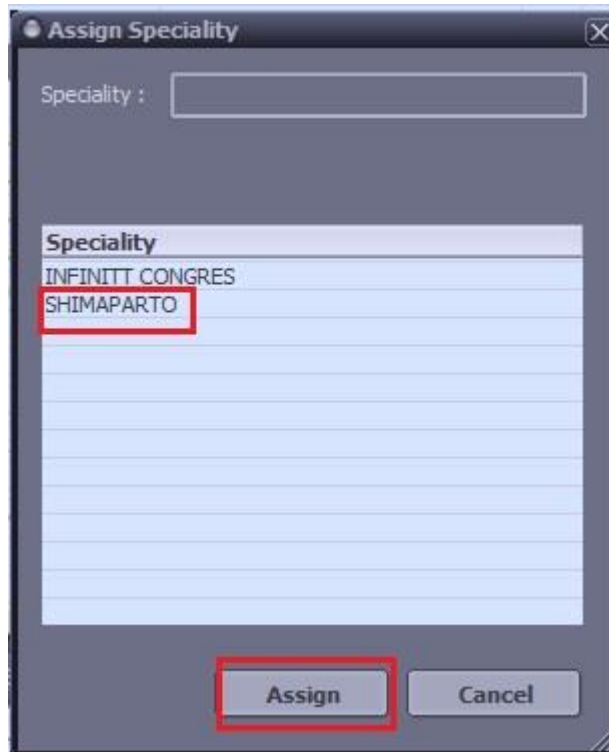

- برای رویت نتیجه پس از ورود به صفحه Worklist در قسمت Find Criteria ، Study ، مورد نظر را بر اساس فیلتر جستجوی Specialty ، جستجو و در کارد زیرین، نام لیبل از قبل اختصاص داده شده را انتخاب نمایید.

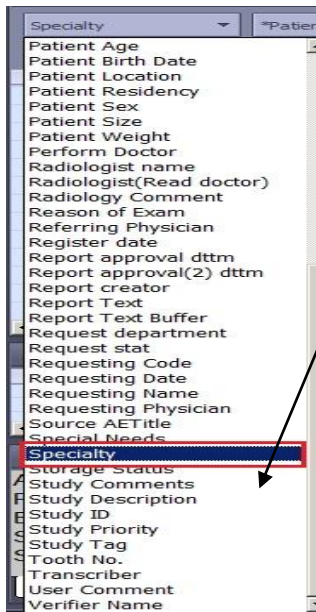

Search results Unlimited

Specialty: SHIMAPARTO

Tech	Status	ID	Name	Sex	Seri...	Ima...	Modality	Body Part	St
Trans...		SYMPHONYV	Facial Mode	F	8	526	CT\SC	HEAD	06
Exami...	Verified	00571061	SPECIAL MAMMO	F	1	2	SD		01
ER ONLY		01464278	INFDEMO	M	3	272	CT		10
ER & RAD		00670136	INFDEMO	M	3	247	CT		10
ER & RAD		1389926	Wojtkowiak Ingo	M	3	116	MR		05
ER & RAD		1623835	Kutzner Christoph	M	7	204	MR		05
ER & RAD		1622288	BREAST_MR	F	9	1828	MR		05
ER & RAD	Verified	01435092	INFINITT_DEMO	F	1	1	DX	PELVIS	11
ER & RAD		01435092	INFINITT_DEMO	F	1	1	DX	PELVIS	11
ER & RAD		00571061	FMX	M	1	1	CR	HEAD	10
ER & RAD		00571061	FMX	M	1	14	IO	FMX18	03
ER & RAD	Verified	KRS CASE 1	Xelis Colon	F	2	1405	CT	ABDOMEN	02

- همانگونه که ملاحظه می‌شود، در صفحه Worklist تنها Study های لیبل فورده، نمایش داده می‌شوند.

Search results Unlimited

Specialty: SHIMAPARTO

OC ER	Tech	Status	ID	Name	Sex	Seri...	Ima...	Modality	Body Part	Study Date
	Exami...		1483351	SPECIAL MAMMO	F	1	2	SD		01/26/2010
ER & RAD	Exami...		1623835	Kutzner Christoph	M	7	204	MR		05/23/2008

- ضمناً می‌توانید لیبل از قبل تعریف شده را به یک فولدر خاص (مثلاً به نام پزشک رادیولوژیست) تفصیص داده و بدین ترتیب، محتویات این فولدر، Study هایی است که لیبل مدنظر را دارا می‌باشند. (این لیبل میتواند نام پزشک رادیولوژیست باشد و نتیجتاً کارتابل هر پزشک رادیولوژیست بصورت متمایز تعریف و در اختیار کاربر ایشان قرار می‌گیرد و شامل study های مرتبط با ایشان است).

**Create search filter**

Folder Information

Folder Name

Description

Link to OnCall

Auto Download Priors

Show Count

Study, DTM, ...

**Add condition** **Delete condition**

<b>Specialty</b>	SHIMAPARTO
Modality	*Any Modality
*Patient ID	*Any Patient ID
*Patient Name	*Any Patient Name
Specialty	*Any Specialty

+

Show exam on top

ITR EMERGENCY STAT  Stat

High

Low

Medium

Routine

OK Cancel