

Demo Folder

- بررسی اجمالی

برخی از رادیولوژیست ها ممکن است بخواهند Study را با Layout فاصی که ساخته اند و با وضعیت نمایش کنونی در مانیتور شامل Rotation, Annotation و ... ، برای استفاده در کنفرانس ها ذخیره نمایند. و یا در مواردی که با زحمت و زمان بسیار، View مدنظر برای یک Study (شامل ... Hanging Protocol, annotation, rotation, 3D) آماده شده اما بدلیل یک کار فورس ماژور مجبور به ترک Station و بستن Study می شوند و بدین ترتیب بدون امکان بازیابی View موجود برای آن Study، زحمات و زمان تخصیص داده شده، از دست خواهد رفت.


INFINITT PACS امکان انجام موارد فوق را از طریق Demo Folder در اختیار کاربران دارای این سطح دسترسی قرار داده است.

بعلاوه شما می توانید در صورت نیاز، ممتویات Demo Folder را با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.


"Demo Folder تصاویر را بطور فیزیکی duplicate نمی نماید."

- نحوه ساخت Demo Folder

۱. مطابق تصویر ذیل در صفحه Worklist وارد پروفایل Demo می شویم:

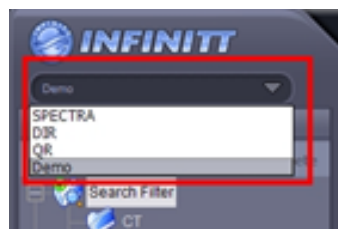


۲. ساخت Parent Folder :

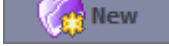۳. گزینه  را برای ساخت پوشه کلیک نمایید.

b. نام و توضیحات مربوط به آن را وارد نمایید.

c. اگر می‌خواهید پوشه جدید را به پوشه Parent اختصاص دهید، گزینه Root را فعال نمایید.

d. گزینه Ok را انتخاب نمایید.

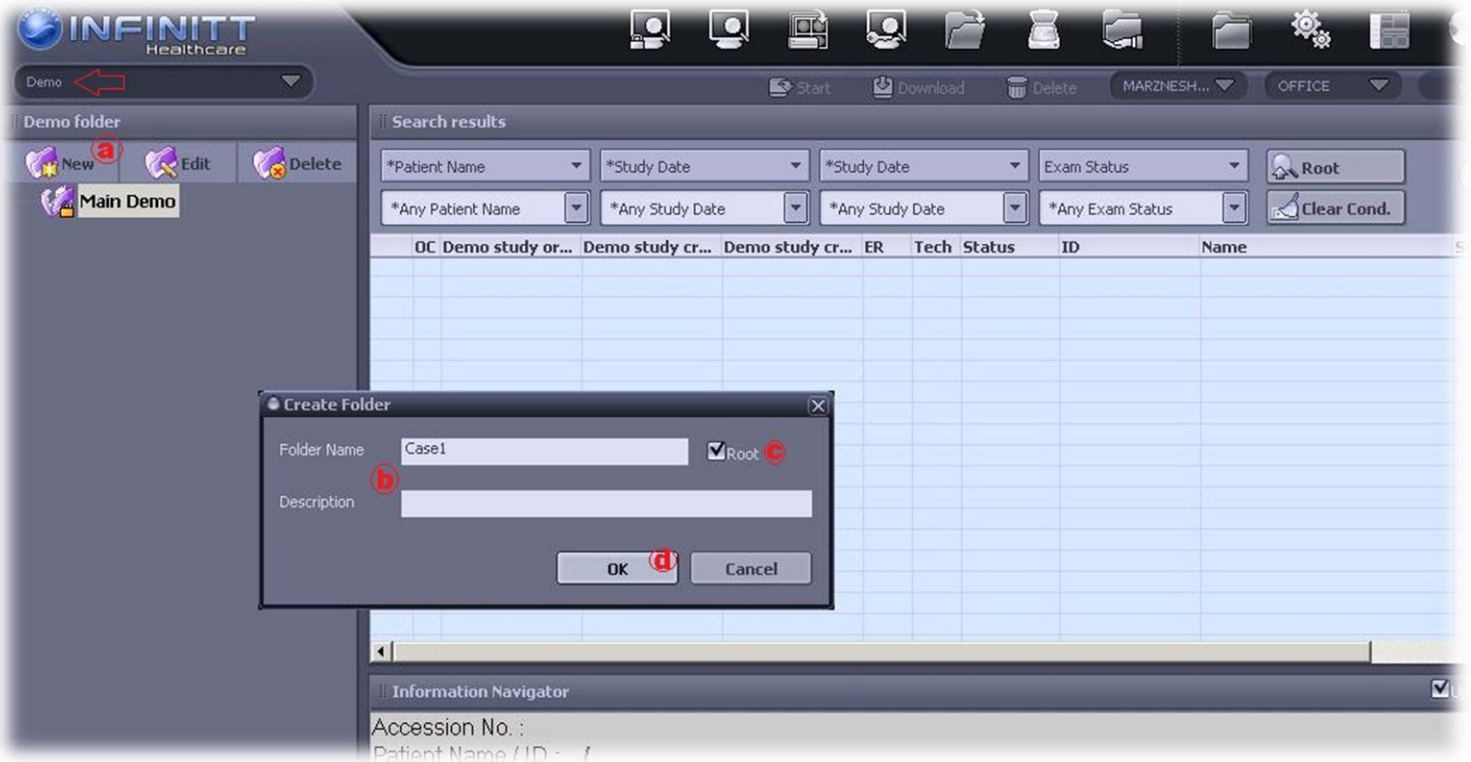


۳. پوشه ایجاد شده می‌تواند برای کاربران مجاز، به اشتراک گذاشته شود :

a. بر روی فولدری که می‌خواهید به اشتراک بگذارید راست کلیک نمایید.

b. Share Folder را انتخاب نمایید.


c. سپس گروه‌هایی که می‌خواهید با آن به اشتراک بگذارید را تعیین نمایید.

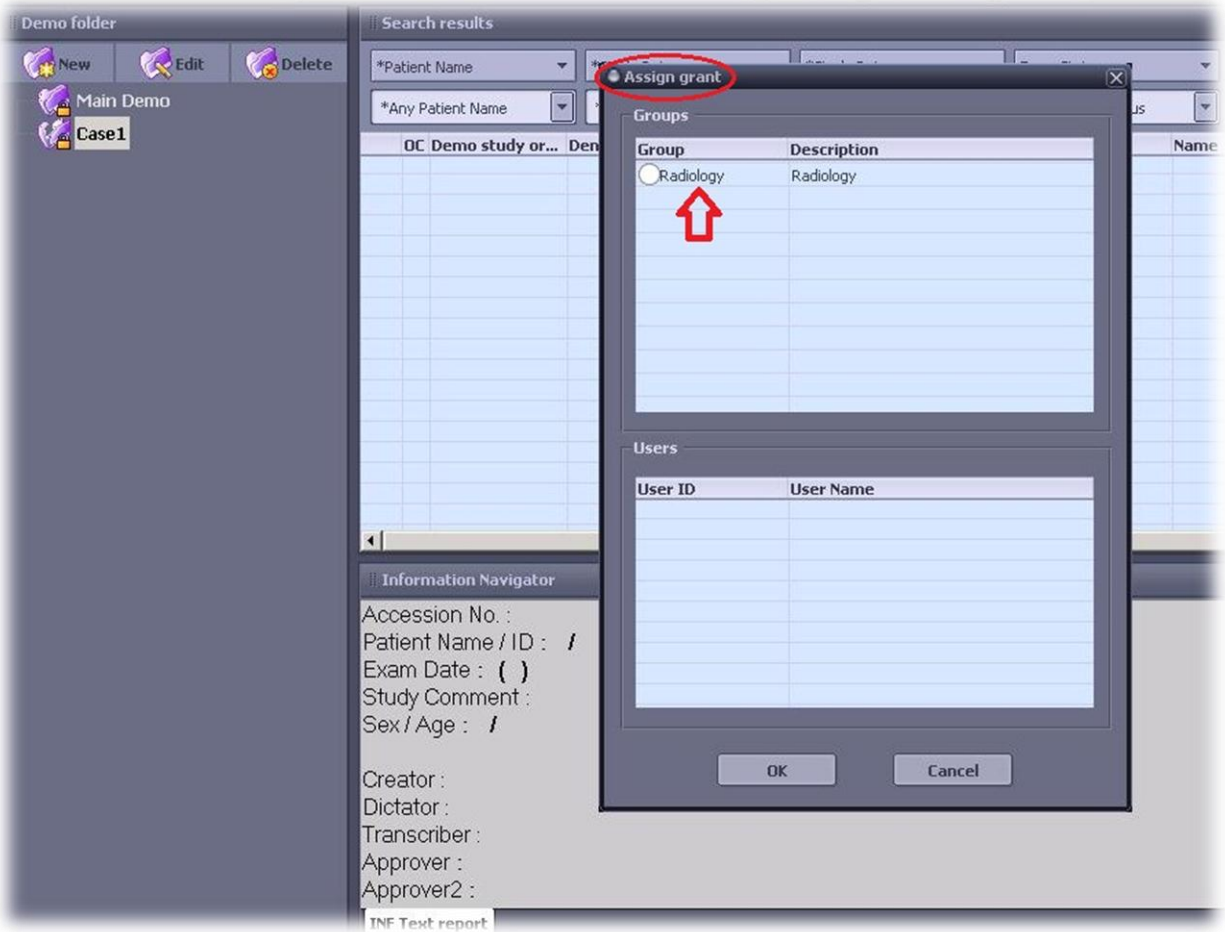


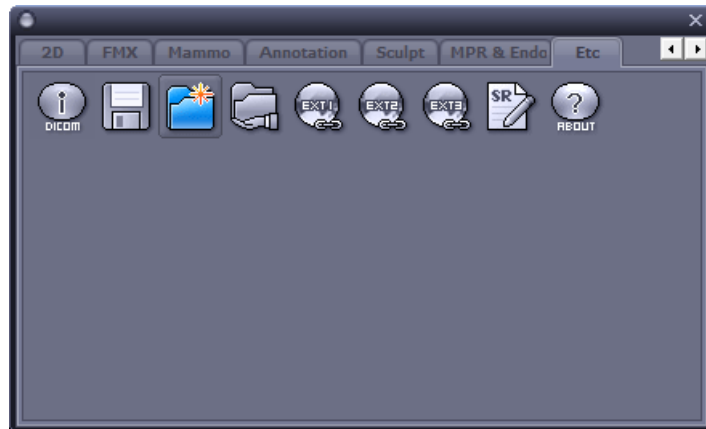
با توجه به شکل فوق و نوع دسترسی تعیین شده، گروه Radiology امکان دسترسی به پوشه "Case1" را ندارند.

۴. نحوه اختصاص دادن Exam به Demo Folder


- a. باز کردن Exam ای که می خواهید از Worklist درون Demo Folder قرار گیرد.
- b. انجام تغییرات لازم برای viewing بهتر مثلا استفاده از یک Hanging Protocol خاص.

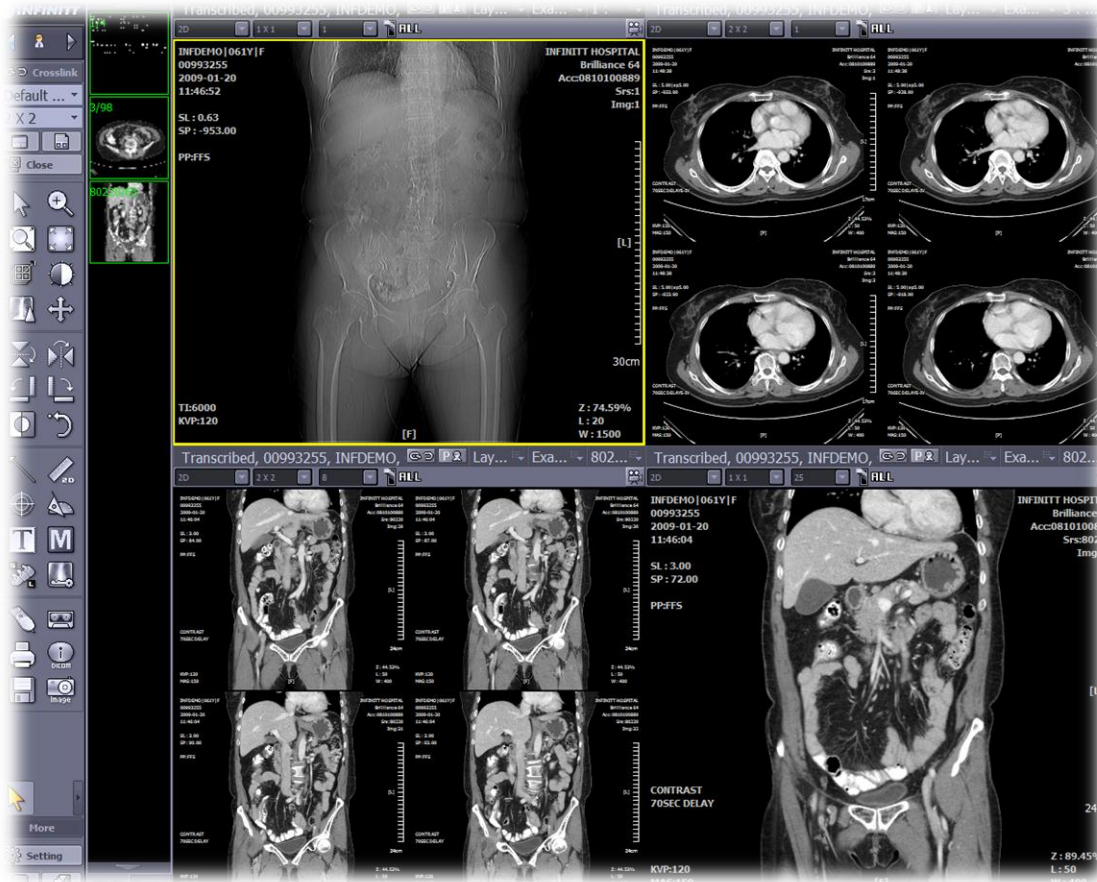


c. بروی آیکن  Demo Folder (از قسمت More و سپس تب Etc) کلیک نمایید.



d. Demo Folder مدنظر خود را انتخاب کرده و گزینه "OK" را کلیک نمایید.

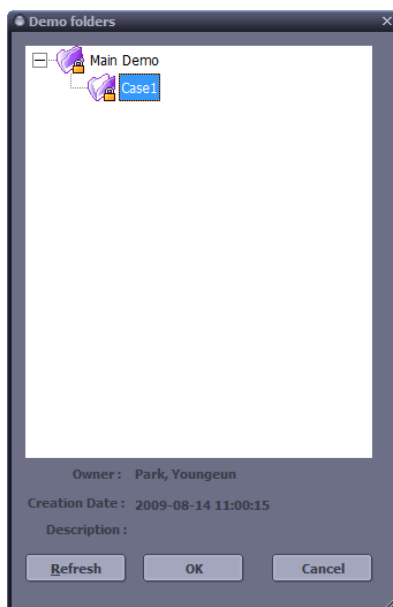

e. در بازگشت به صفحه Worklist و انتخاب پروفایل Demo، شما می توانید Study های ذخیره شده را بررسی نمایید.

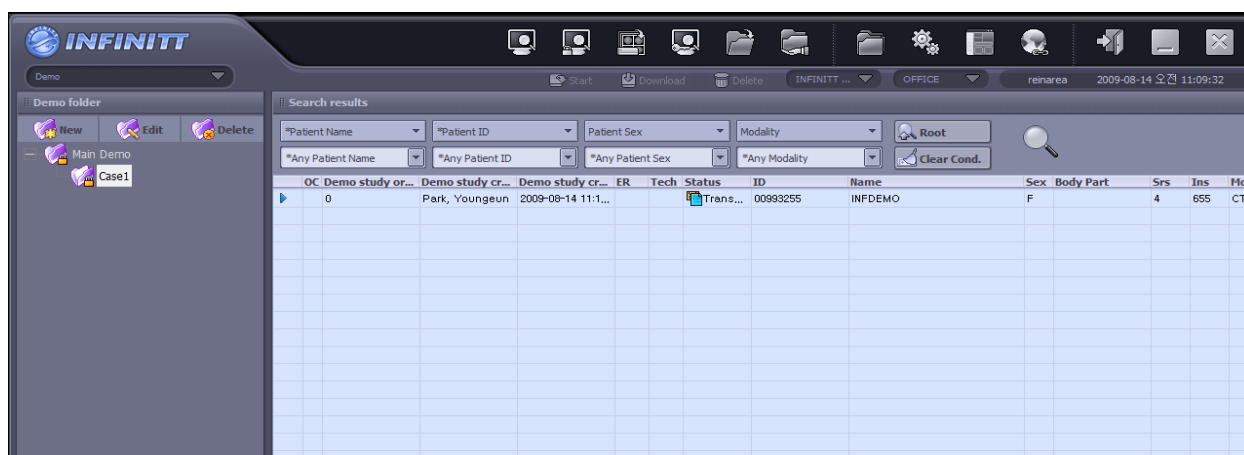

f. باز کردن Study ها از پوشه Demo و قابلیت نمایش آنها با Layout نمایش داده شده قبلی (b-۴).

۵. حذف Exam از Demo Folder: برای حذف Exam از درون Demo Folder، کافیهست Exam مورد نظر را انتخاب نمایید، سپس با راست کلیک کردن بروی آن و انتخاب گزینه Delete، Exam مورد نظر از Demo Folder پاک می گردد.