

How to configure Image Set title bar information


بررسی اجمالی

Infinitt PACS این امکان را به کاربران می‌دهد تا در هنگام استفاده از PACS بتوانند اطلاعات مربوط به Study بیماران را در صفحه Viewing مشاهده نمایند.

به این صورت که کاربر بدون خروج از صفحه viewing و ورود به worklist می‌تواند اطلاعات مربوط به study مانند نام، تاریخ، اطلاعات مودالیتی و... را مشاهده و در صورت لزوم آنها را به نوار ابزار مرتبط در صفحه Viewing اضافه و یا کم نماید.

روش کار

۱- در صفحه Viewing بر روی title bar که در بالای صفحه قرار دارد کلیک راست نمایید.

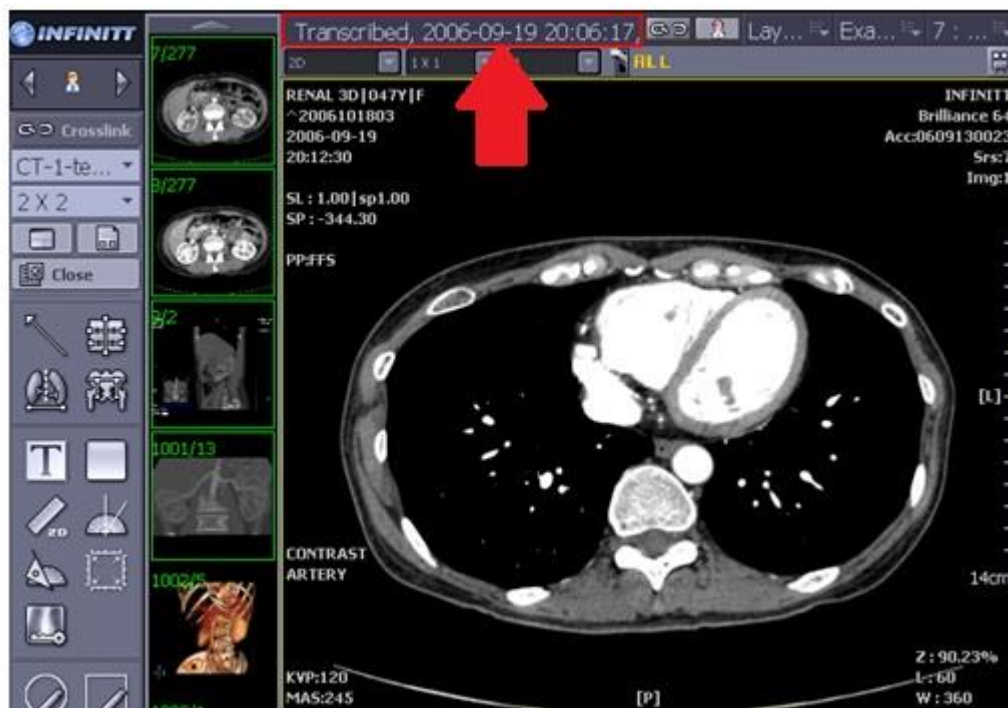

۲- پس از کلیک راست، پنجره Image set title bar information مطابق شکل زیر باز می‌شود.



۳- در پنجره باز شده می‌توانید اطلاعاتی را که مایلید روی نوار ابزار صفحه Viewing ملاحظه نمایید، تیک زده و اطلاعاتی را که نمی‌خواهید بدون تیک در نظر گرفته و Ok نمایید. ضمناً می‌توانید اولویت نمایش این عناوین را با گزینه‌های Up و Down تغییر دهید.

به عنوان مثال در تصویر زیر، گزینه‌های Name و study date و Exam status را به ترتیب اولویت نمایش فعال ساخته‌ایم.

