


How to use oncall

مرور اجمالی:


سرعت پایین اینترنت و قطع و وصل‌های مکرر در هنگام مشاهده تصاویر بیماران از طریق وب توسط پزشکان ممتزم رادیولوژیست، همواره بعنوان دغدغه‌ی اصلی در مبحث تله‌رادیولوژی مطرح می‌شود. INFINITT PACS با ارائه قابلیت On-call سعی در رفع این مشکل با فراهم‌آوری امکان ذخیره تصاویر روی هارددیسک سیستم پزشک و فراخوانی تصاویر از آنجا (با سرعت بالا)، نموده است.

روش کار:

۱. پس از ورود به صفحه Worklist، ابتدا سرویس on-call را از نوار ابزار، استارت نمایید. (شماره ۱).
۲. سپس Exam یا Exam های موردنظر را انتخاب نمایید. (شماره ۲).
۳. گزینه Download را از نوار ابزار کلیک نمایید. (شماره ۳)

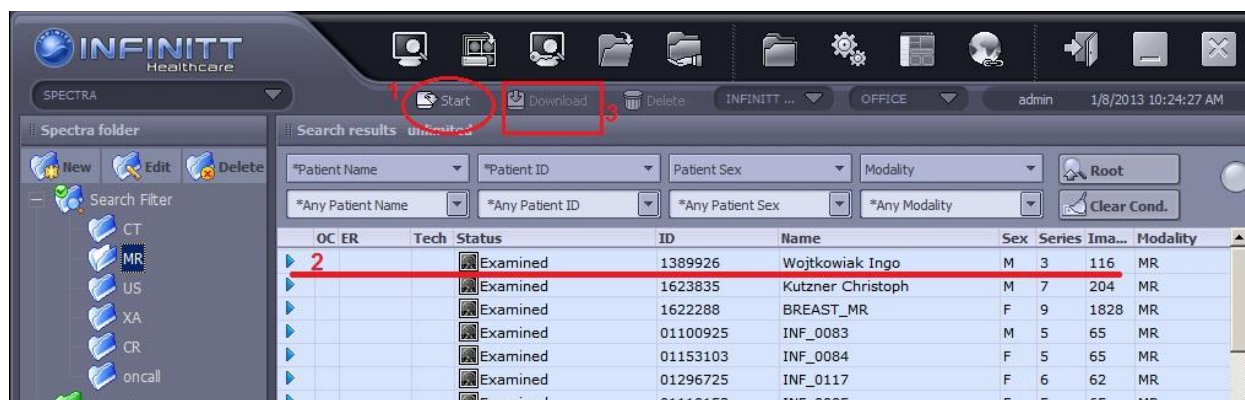

جهت مشاهده وضعیت دانلود تصاویر، می‌توانید مطابق شکل زیر به قسمت System Tray (نوار ابزار ویندوز کنار ساعت سیستم) روی آیکن on-call (گوی زرد رنگ) راست کلیک نمودن و گزینه show را انتخاب نمایید.

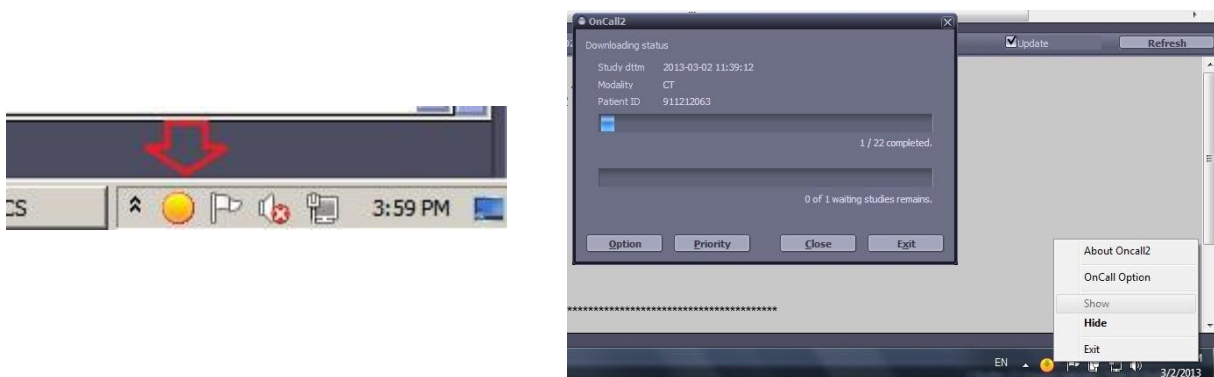

همچنین با انتخاب گزینه option می‌توانید تنظیمات on-call option را مطابق سلیقه خود تغییر دهید. (بعنوان مثال study ها پس از چه مدت زمانی از روی ها/ددیسک پاک شوند).


پس از اتمام دانلود هر study، در ستون oc در صفحه worklist و در کنار study دانلود شده، یک گوی قرمز رنگ مطابق شکل زیر ظاهر می‌شود که نشان‌دهنده اتمام فرآیند دانلود تصاویر study و امکان استفاده از آن می‌باشد.




توصیه می‌شود که از ابتدا بیمارانی که می‌خواهیم on-call شوند را همگی انتخاب و تمت دانلود قرار دهیم. بممض تکمیل فرآیند دانلود هر کدام از این study ها (پس از مدت زمان مثلاً ۲ دقیقه، دوبار متوالی گزینه search را در worklist کلیک نماییم تا محتویات صفحه worklist، اصطلاحاً refresh شوند و study های دانلود شده را ببینیم) و نمایانگر شدن گوی قرمز در کنار آن، می‌توانیم آن study را مشاهده و برامتی پردازش‌های سه بعدی را نیز با سرعت بالا انجام دهیم و پس از بازگشت به صفحه worklist فوهایم دید که تمام یا برقی دیگر از study های انتخاب شده نیز بصورت کامل دانلود شده‌اند و بدین ترتیب، می‌توانیم آنها را مشاهده نماییم و

زمان را بدین صورت ذخیره نماییم. (یعنی همزمان مشاهده تصاویر دانلود شده و دانلود تصاویر را با هم داشته باشیم).

Exam های دانلود شده در مسیر C:\INFINITT\VIEWER\OnCall2 کامپیوتر شخصی شما ذخیره شده اند.

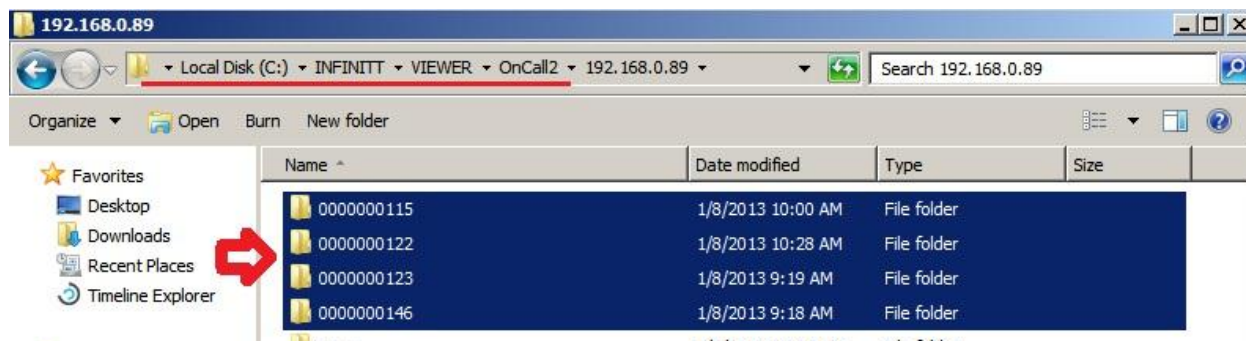

برای حذف فایل oncall از روی فضای کامپیوتر شخصی، ابتدا Start و سپس بر روی Exam کلیک کرده و

Delete را انتخاب نمایید. در نهایت علامت  از کنار Exam پاک می شود.

